



МАССАЖНОЕ КРЕСЛО

BM2H / 70 см

RELAX ULTRA

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1. Вскройте упаковку, извлеките массажный стул и установите его в вертикальное положение.
2. Начало сборки: поднимите сиденье вверх таким образом, чтобы полки для ног опустились на переднюю раму. Убедитесь, чтобы фиксатор сиденья был закреплен в специальном отверстии.
3. Откройте защелку рядом с подголовником, установите его в нужном для вас положении и зафиксируйте подголовник с помощью защелки.
4. Установите подлокотник на удобное для вас положение и зафиксируйте.

Следуя простым советам сборки, вы сможете легко отрегулировать кресло для вашего комфорта.

Максимальная нагрузка на массажное кресло не более 100 кг.



Регулировка кресла

1. Для регулировки высоты подголовника, ослабьте фиксатор и опустите/приподнимите ось подголовника. Изменить можно не только высоту, но и угол наклона (3 положения).
2. Опускать, приподнимать и перемещать кресло можно только в вертикальном положении.
3. Для вашего комфорта подголовник можно убрать с лицевой панели, раздвинуть для расширения или сузить для уменьшения.

Складывание

1. Опустите грудную панель и подголовник в их прежнее положение.
2. Установите подлокотник в вертикальное положение.
3. Сложите подголовник.
4. Поднимите заднюю часть сиденья и вытащите полки для ног. Это поможет приподнять кресло, а задняя рама сдвинется к передней.
5. Поднимите кресло, положите его в чехол сиденьем вниз так, чтобы колеса оказались наверху.
6. Натяните чехол через верх и вокруг кресла и закройте чехол.
7. Чехол выполнен из прочного материала, удобного для хранения и перемещения кресла.

RELAX ULTRA



Условия гарантии:

Гарантийное оборудование принимается в ремонт или на замену только в оригинальной упаковке и при наличии всех аксессуаров;

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию столов без дополнительного уведомления потребителей;

Транспортировка к месту и от места ремонта производится покупателем.

Гарантия составляет 6 месяцев. Гарантия не действительна при любом отклонении от указаний в инструкции

Гарантия не распространяется:

- на случаи вызванные нарушением правил эксплуатации, в том числе при наличии механических повреждений, включая вмятины и царапины;

- на мягкие части и покрытие из кожзаменителя;

- и прекращает своё действие в полном объеме при не согласованной с представительством, самостоятельной попытке вскрытия и/или ремонта.

Выбор места и установка:

Не устанавливайте массажные столы и косметологические кресла в месте где имеется избыточная влажность, в пыльных местах, в местах прямого попадания солнечных лучей, возле обогревательных приборов и каминов.

Для долговечной работы массажных столов и косметологических кресел важно, что бы они находились на ровной поверхности. После установки на место отрегулируйте его положение путем вращением регулировочных опор, находящихся в ножках.

Не устанавливайте массажные столы и косметологические кресла на толстом ковре.

Обслуживание и уход:

Дезинфекция: наружные поверхности столов и их частей протирать салфеткой, смоченной в 3 % растворе перекиси водорода.

Никогда не используйте органические растворители, абразивные, хлоро- и амиаксодержащие и другие химические вещества. Очистку стола необходимо делать как написано выше.

Коммерческое использование:

Коммерческое использование данного массажного стола влечет за собой потерю гарантии.